


## Istuin vioittunut

### Istuimen vaihto

Kruiser, Premium Pack, Professional, Long Range, Trike

Tarvittavat työkalut 10mm hylsyavain. Ohjeaika 0,1h.

1. irrota istuimen 10mm kiinnitysmutterit (3kpl) istuimen alapuolelta (kuva 1).
2. Nosta istuin pois (kuva 2) ja vaihda uusi tilalle.

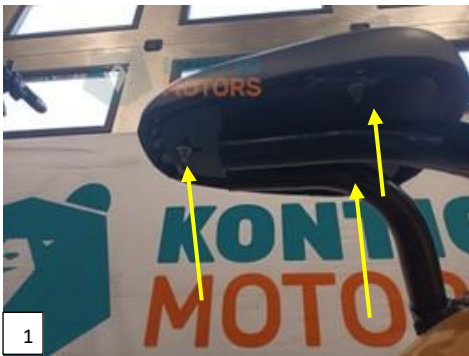

Voit huollattaa Kruiserin myös Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät [www.kontiomotors.fi](http://www.kontiomotors.fi)