

Elektran etuakselin väliholkin vaihto

KMOSA1131

Ohjeaika: 2 min.

Tarvittavat työkalut:

- Kiintoavain 17 mm, 14 mm
- Koroke



Nosta laitteen etupää korokkeelle niin, että etupyörä on irti maasta. Irrota etuakselin mutteri. (kiintoavain 17 mm).



Vedä akseli pois. Kannattele samalla etupyörää, ettei pääse putoamaan.



Laske etupyörä alas.



Ota holkit pois.
Laita etuakselin väliholkit molemmin puolin etupyörään paikoilleen.

Loppu käänteisessä järjestyksessä.