

Seisontajalka vioittunut

Seisontajalan vaihto

Kruiser, Premium Pack, Professional, Long Range

Tarvittavat työkalut 8mm kuusiokoloavain. Ohjeaika 0,25h.

1. Irrota jalan kiinnityspultti (kuva 1), vedä jalka pois (kuva 2) ja irrota jousi (kuva 3).



2. Aseta jousi (kuva 4) ja jalka paikalleen (kuva 5). Aseta pultin reiät kohdilleen ja kiinnitä pultti (kuva 6).



Voit huollattaa Kruiserin myös Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät www.kontiomotors.fi