

Ohjeaika: 40 min.

**Tarvittavat työkalut:**

- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Ristipäämeisseli ph2

**Oire:** Laite ei toimi lainkaan tai ajoaika lyhentynyt huomattavasti.




Avaa istuimen lukitus avaimella.



Käännä laitteen päävirtakytkin off- asentoon ja irrota kuvassa näkyvät kiinnityspultit. (kuusiokoloavain 8 mm).



Nosta tavaralokero pois.

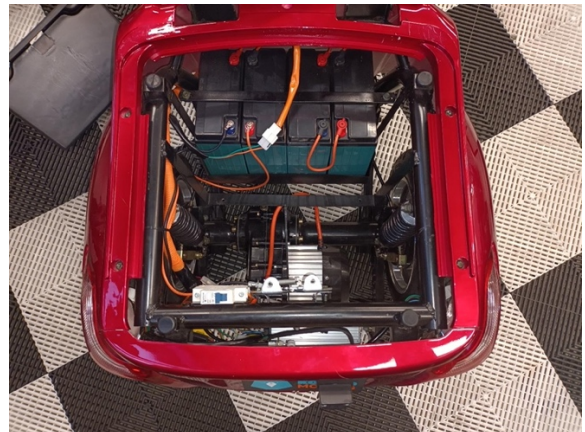





Irrota kiinnitysraudan kiinnityspultit (kuusiokoloavain 8 mm) ja nosta kiinnitysrauta pois.



Avaa akun napojen suojatulpat.

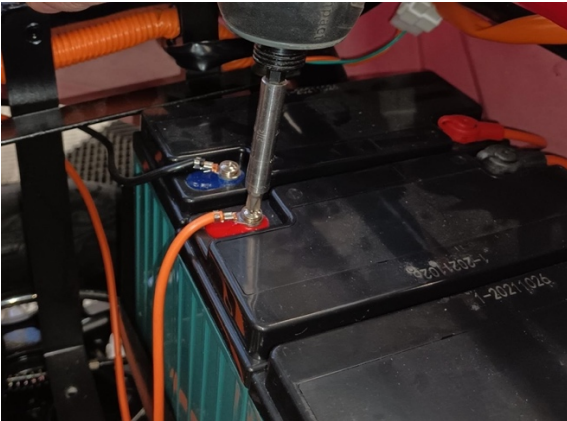

Irrota akkuun menevät johdot. (ristipäämeisseli ph2). **Huomio.** Älä koske samanaikaisesti akun plus ja miinus napaan, ettei akku mene oikosulkuun.

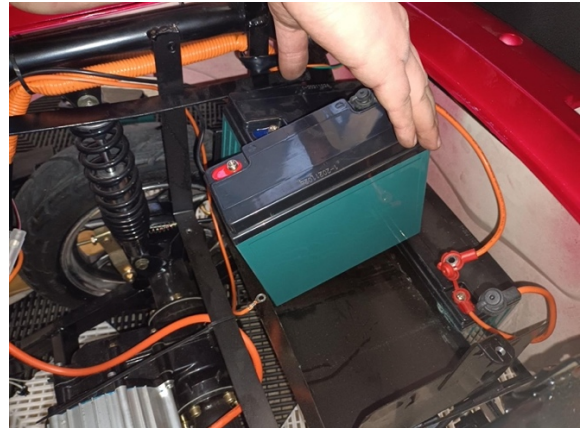

Nosta akku pois.

**Uuden akun asennus käänteisessä järjestyksessä.**