

## Silverfox kippauksen eston tukipyörän vaihto

KMJCFXOSA101

Ohjeaika: 2 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Räikkä ja hylsy 10 mm
- Kiintoavain 8 mm



Irrota kippauksen eston tukipyörän kiinnityspultti, (kiintoavain 8 mm) jolla on vastamutteri. (hylsy 10 mm).



Ota kippauksen eston tukipyörä pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**