

Tiffany istuimen alapuoleisen muovin vaihto

KMTEOSA021

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm, 4 mm
- Kiintoavain 10 mm

Ohjeaika: 30 min.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

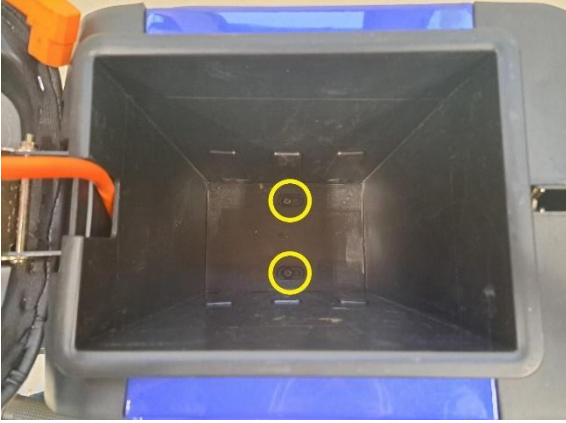

Irrota akkukotelon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).




Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen vasemmanpuoleinen
alasivumuovi pois.




Irrota istuimen oikeanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).

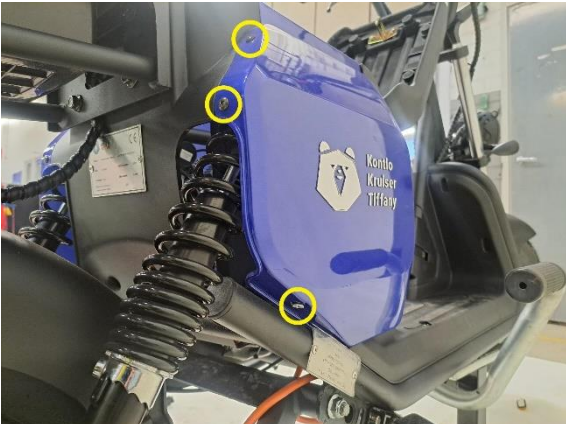

Irrota istuimen oikeanpuoleisen alisivumuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota oikeanpuoleinen alisivumuovi pois.

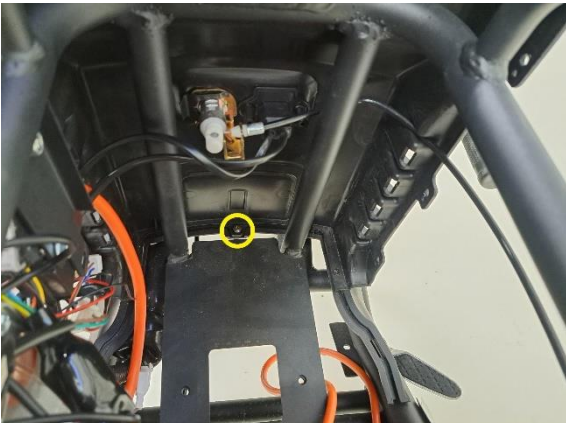

Irrota istuimen alapuoleisen muovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).




Irrota penkin kiinnityspultti (ristipäämeisseli ph2) jolla on vastamutteri (kiintoavain 10 mm).



Ota penkki pois.




Irrota penkin lukon vaijeri.

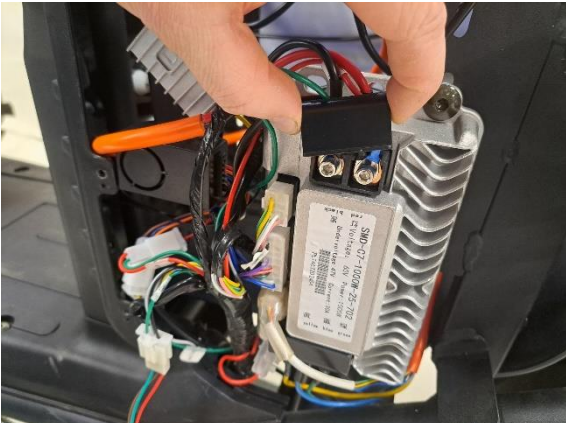


Ota ohjain laitteen virtajohtojen suoja pois.



Irrota ohjainlaitteen virtajohtojen kiinnityspultit (kuusiokoloavain 4 mm).

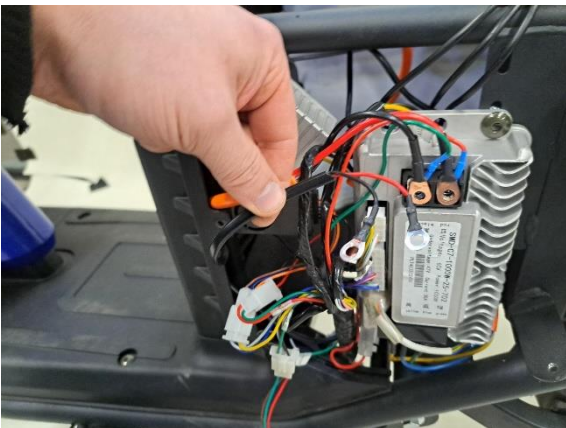

Ota ulkoisen latauspistokkeen johdot irti.

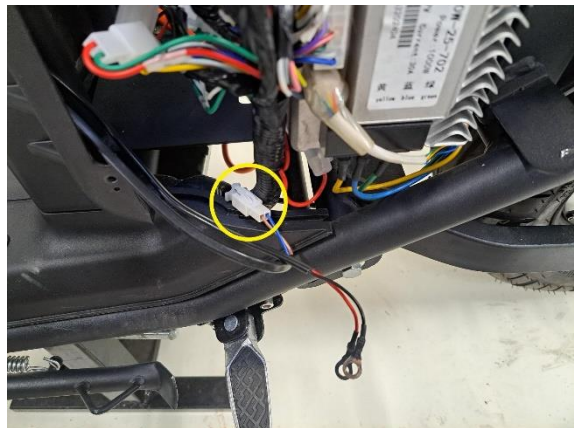

Avaa ulkoisen latausliittimen liitin.



Ota istuimen alapuoleinen muovi pois.



Irrota ulkoisen latausliittimen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota ulkoinen latausliitin irti istuimen alapuoleisesta muovista.



Ota istuimen lukon kiinnitysklipsi pois.



Ota istuimen lukon vaijerin pidike pois.



Ota istuimen lukko pois istuimen alapuoleisesta muovista.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.