

Tiffany jalkatuen jousen vaihto

KMTEOSA055

Tarvittavat työkalut:

- Koroike
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 17 mm

Ohjeaika: 5 min.



Nosta laite korokkeelle.



Irrota jalkatuen sähkölukon kiinnityspultti (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota jalkatuen sähkölukko pois.



Irrota jalkatuen kiinnityspultti (kiintoavain 17 mm).



Ota jalkatuki pois.



Ota jalkatuen jousi pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.