

## Tiffany jalkatuen sähkölukon vaihto

KMTEOSA036

### Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Sivuleikkurit
- Nippusiteitä

Ohjeaika: 35 min.

Oire: Laite ei liiku.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

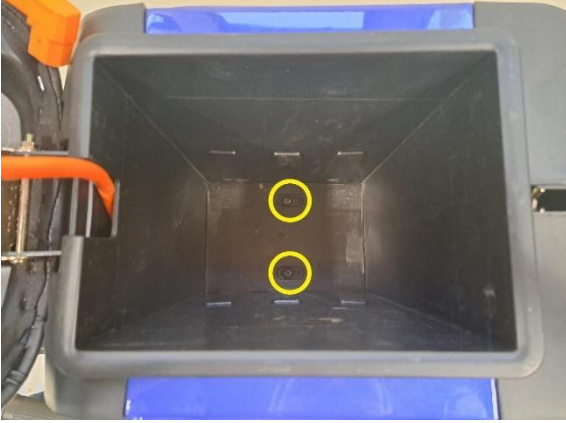

Irrota akkukotelon kiinnityspultit  
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen  
alasivumuovin kiinnitysruuvit  
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen  
alasivumuovin kiinnitysruuvit  
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen vasemmanpuoleinen  
alasivumuovi pois.




Irrota istuimen oikeanpuoleisen  
alasivumuovin kiinnitysruuvit  
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota istuimen oikeanpuoleisen alisivumuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota oikeanpuoleinen alisivumuovi pois.

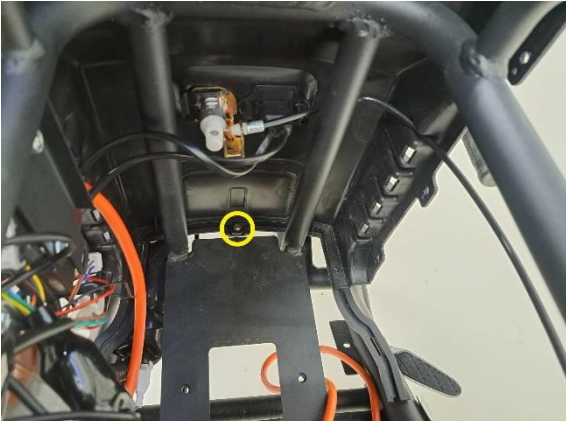

Irrota istuimen alapuoleisen muovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Irrota vasemmanpuolen jalkatilan suojamuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota vasemmanpuoleinen suojamuovi pois.



Irrota oikeanpuoleisen suojamuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota oikeapuoleinen suojamuovi pois.




Irrota jalkatilan muovin kiinnityspultit (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota jalkatilan muovi pois.



Katko johtosarjan liittimien suoja kiinni pitävät nippusiteet (sivuleikkurit).

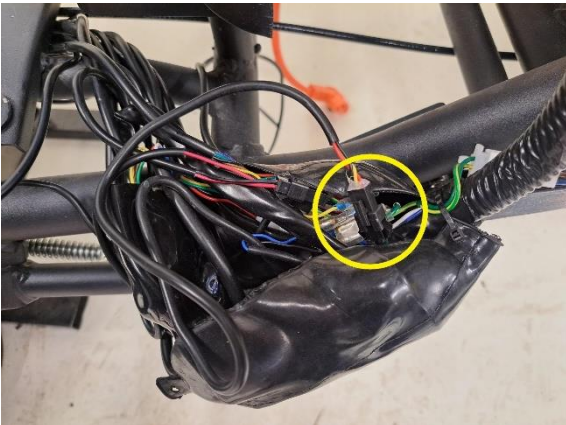

Avaa jalkatuen sähkölukon liitin.



Irrota jalkatuen kiinnityspultti (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota jalkatuen sähkölukko pois.



Pujota jalkatuen sähkölukon johto pois johtosarjasta.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**