

Tiffany muuntajan vaihto

KMTEOSA030

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 10 mm

Ohjeaika: 15 min.

Oire: 12 voltin järjestelmä ei toimi.



Avaa penki lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

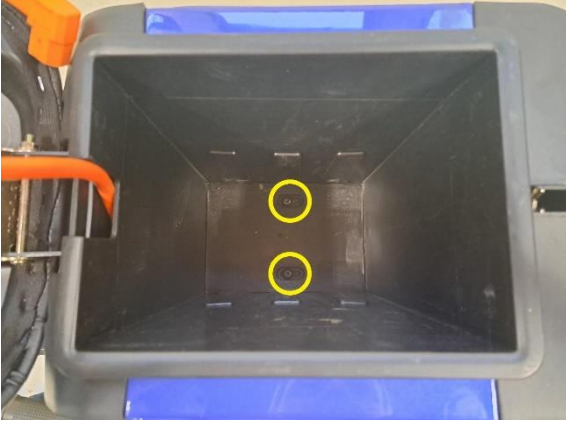

Irrota akkukotelon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.




Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).




Ota istuimen vasemmanpuoleinen
alasivumuovi pois.

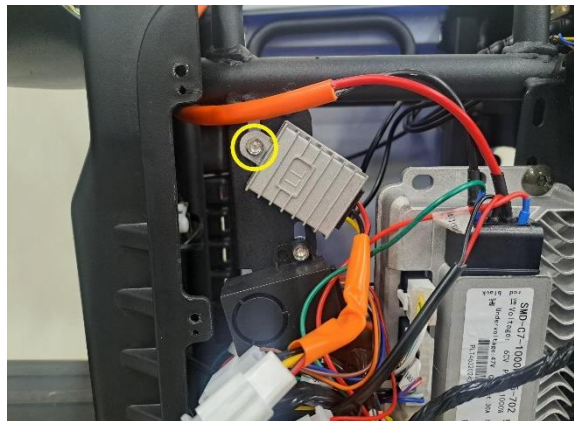

Irrota muuntajan kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm) ja vastapuolen mutteri
(kiintoavain 10 mm).



**KONTIO
MOTORS**

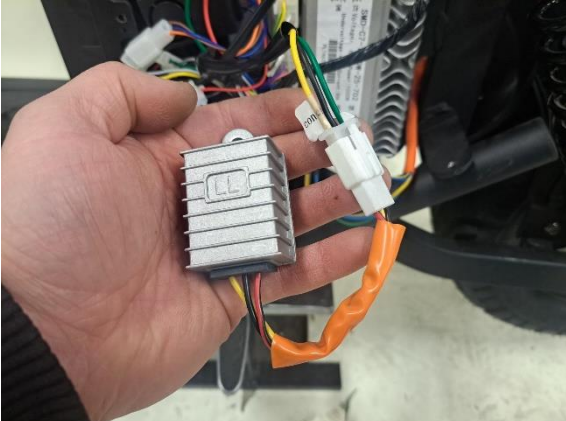

Avaa muuntajan liitin ja ota muuntaja pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.