

Autokruiser akkujen kiinnikeraudan vaihto

KMOSA0272

Ohjeaika: 16 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 10 mm, 8 mm



Paina päävirtakyttin kiinni.



Nosta takaistuin pois. (tarrakiinnitys).



Irrota velcro tarranauhojen reunimaiset kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).




Käännä velcon tarranauhat pois tieltä. Irrota tarranauhojen alta paljastuvat kiinnitysruuvit. (hylsy 8 mm).



Irrota takaistuimen rungon kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Nosta takaistuimen runko osa pois.

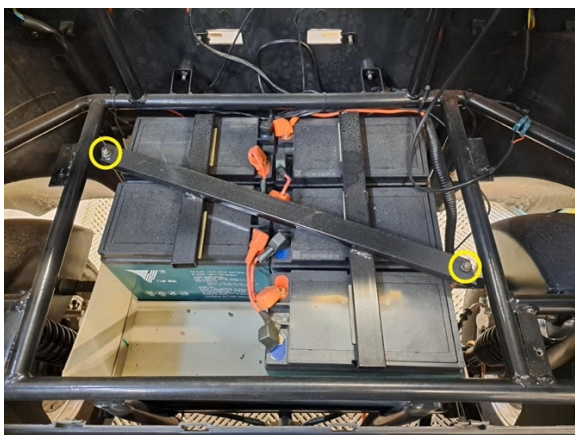

Irrota akkujen kiinnikeraudan
kiinnitysmutterit. (hylsy 10 mm).



Nosta akkujen kiinnikerauta pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.