

E-manki ohjainlaitteen vaihto

KMQ015

KMQ095

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kiintoavain 10 mm
- Räikkä ja hylsy 8 mm

Ohjeaika: 20 min.

Oire: Laite ei liiku.



Avaa akkukotelon kannen lukitus.



Ota akkukotelon kansi pois.




Irrota akun pistoke.




Irrota istuimen kiinnitysmutteri
(kiintoavain 10 mm).




Ota istuin pois.

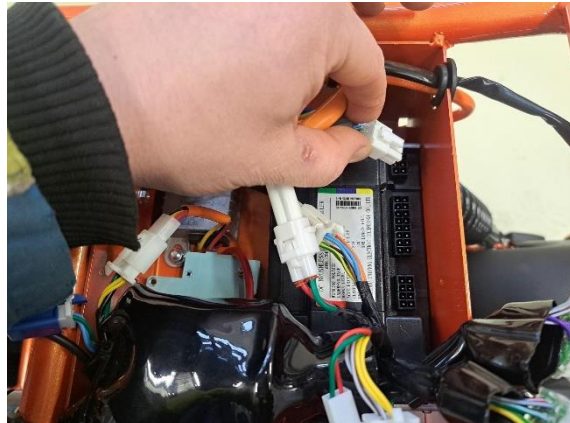

Irrota kaikki ohjainlaitteessa kiinni olevat pistokkeet.

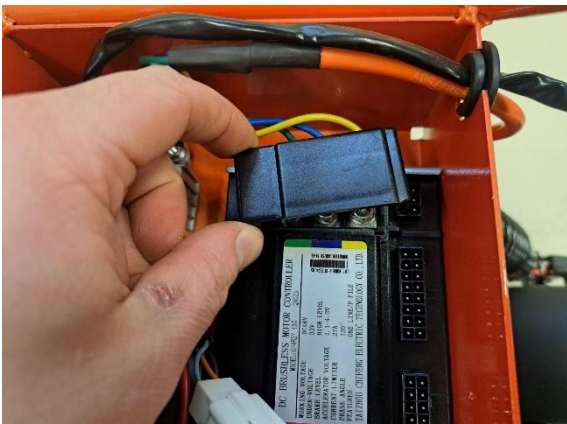


Irrota moottorin vaihe liitântöjen suoja ohjainlaitteesta.

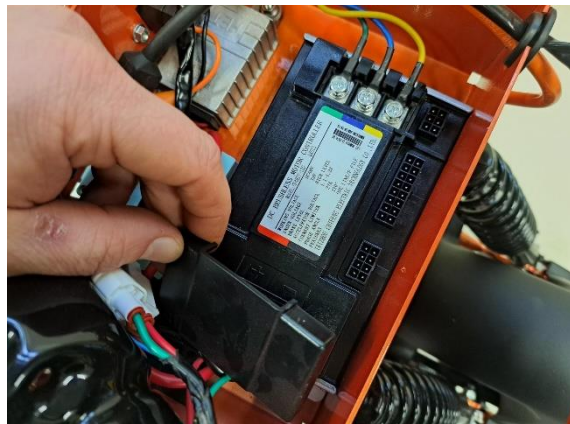


Irrota päävirta liitântöjen suoja ohjainlaitteesta.



Irrota moottorin vaihejohtojen ja päävirtajohtojen kiinnitysruuvit ohjainlaitteesta (ristipäämeisseli ph2).

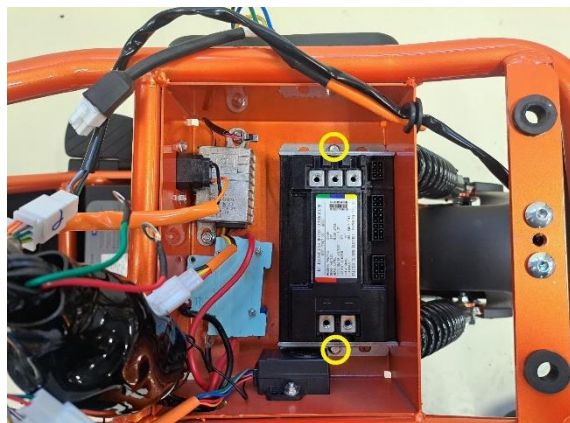

Irrota ohjainlaitteen kiinnityspultit (hylsy 8 mm) ja vastapuolen kiinnitysmutteri (kiintoavain 10 mm).

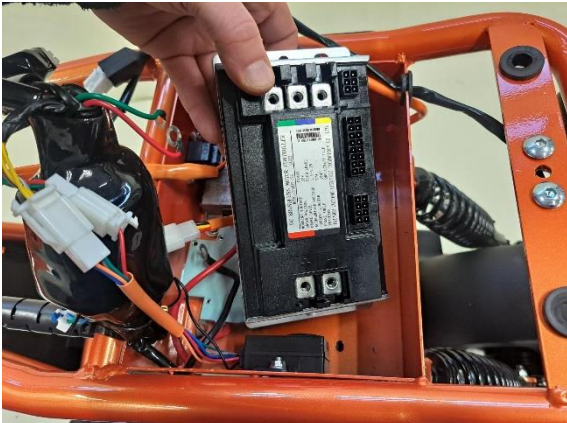

Ota ohjainlaite pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.